



Oxivir Sporicide Wipe CE

Toallitas limpiadoras y desinfectante de amplio espectro

Descripción

Diversey Care Oxivir Sporicide Wipe es un limpiador desinfectante listo para usar en un solo paso efectivo, entre otros, frente a *Clostridium difficile* y *Bacillus subtilis*. Basado en la tecnología de Peróxido de Hidrógeno Acelerado (AHP), Oxivir Sporicide Wipe puede aplicarse, para desinfectar superficies no porosas en el entorno médico-hospitalario y aparatos médicos no invasivos.

Propiedades

- Efectivo frente a *C difficile* en 1 minuto*
- Esporicida, Bactericida, Virucida, Levuricida, Fungicida, en tan sólo 1 minuto
- Perfil de seguridad de usuario y superficies positivo, en comparación con otros esporicidas
- Limpiador eficaz
- Sin perfume
- Se descompone en agua y oxígeno - No deja residuos activos tras su aplicación
- No contiene cloro o alcohol

Beneficios

- Excelente respuesta frente a brotes de *C difficile*
- Amplia eficacia frente a todas las otras clases de patógenos, proporcionando un alto nivel de protección en los pacientes
- Tiempos reducidos de contacto que garantizan la eficacia del desinfectante
- No requiere aclarado
- No produce irritación de las vías respiratorias
- ***Please translate: Suitable for use in high risk areas in Healthcare, including OR, ICU, NICU and patient rooms***

Modo de empleo


Limpieza y desinfección:

1. Eliminar la suciedad gruesa.
2. Abrir el paquete de toallitas, sacar una toallita y cerrar de nuevo.
3. Pasar la toallita por la superficie, asegurando que húmeda, dejar secar al aire.
4. Asegurarse que la superficie queda húmeda el tiempo necesario de contacto.
5. Cambiar de toallita cuando esta esté visiblemente limpia o cuando cambie de área de limpieza.

* Cuando se aplica como desinfectante final con un paso previo de limpieza

CE
0088

AHP®
Patented

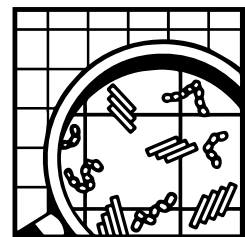

© A.I.S.E.



Oxivir Sporicide Wipe CE

Información técnica

Apariencia: Toallitas de polipropileno de 25GSM

pH (producto diluido): 2.7 ± 0.3

Densidad Relativa (20°C): 1.03265

Caducidad: 720 días

Estos valores son los estándares de fabricación y no deben utilizarse como especificaciones.

Precauciones en su manipulación y almacenamiento

Información completa sobre manipulación y eliminación del producto se suministra aparte en la Ficha de Datos de Seguridad; sds.diverseym.com. Almacenar en el envase original cerrado y mantener alejado de temperaturas extremas. En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono 915 620 420. Restringido a usos profesionales.

Please translate: Reacts with oxidisable substances.

Compatibilidad del producto

Se debe llevar guantes cuando se aplique Oxivir Sporicide Wipe. No mezclar con otros productos. No aplicar sobre superficies sensibles al agua o a los productos ácidos.

Información microbiológica

Eficacia probada cumpliendo las normas europeas: EN13727, EN13624, EN13697, EN14476, EN13704, EN14348 y EN16615.

Información medioambiental

Los tensioactivos utilizados en este producto son biodegradables, conforme a los requisitos descritos en EU Detergent Regulation, EC 648/2004.